

ICE™ Protocolo de Fresado

Secuencia de fresado utilizando fresas por pasos




Ø Diámetro	Hueso blando Tipo IV	Hueso medio Tipo II&III	Hueso duro Tipo I
Ø 3.7N	2.0 2.0/2.4	2.0 2.4/2.8 2.8/3.2	2.0 2.4/2.8 2.8/3.2 3.2/3.65 Cortical
Ø 3.75	2.0 2.4/2.8	2.0 2.4/2.8 2.8/3.2	2.0 2.4/2.8 2.8/3.2 3.2/3.65 Cortical
Ø 4.2	2.0 2.4/2.8 2.8/3.2	2.0 2.4/2.8 3.2/3.65	2.0 2.4/2.8 3.2/3.65 3.65/4.1 Cortical
Ø 4.65	2.0 2.4/2.8 3.2/3.65	2.0 2.4/2.8 3.2/ 3.65 3.65/4.1	2.0 2.4/2.8 3.2/ 3.65 3.65/4.1 4.1/4.5 Cortical
Ø5.3	2.0 2.4/2.8 3.2/ 3.65 3.65/4.1	2.0 2.4/2.8 3.2/ 3.65 3.65/ 4.1 4.5/4.8	2.0 2.4/2.8 3.2/ 3.65 3.65/ 4.1 4.5/4.8 4.8/ 5.2 Cortical

Cortical - Fresado a través de la placa cortical con el diámetro más grande.

Fresa por pasos

Protocolo revisado

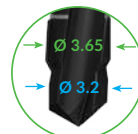

- 16 mm
- 13 mm
- 11.5 mm
- 10 mm
- 8 mm
- 6 mm
- 0 mm

ICE™

Protocolo de Fresado

Secuencia de fresado utilizando fresas rectas

Ø Diámetro	Hueso blando	Hueso medio	Hueso duro
	Tipo IV	Tipo II&III	Tipo I
Ø 3.7N	2.0	2.0	2.0
	2.4*	2.8	2.8
		3.2*	3.2*
			3.65 Cortical
Ø 3.75	2.0	2.0	2.0
	2.4	2.8	2.8
	2.8*	3.2*	3.2*
			3.65 Cortical
Ø 4.2	2.0	2.0	2.0
	2.8	2.8	2.8
	3.2*	3.2	3.2
		3.65*	3.65*
		4.1 Cortical	
Ø 4.65	2.0	2.0	2.0
	2.8	2.8	2.8
	3.2	3.2	3.2
	3.65*	3.65	3.65
		4.1*	4.1*
		4.5 Cortical	
Ø 5.3	2.0	2.0	2.0
	2.8	2.8	2.8
	3.2	3.2	3.2
	3.65	3.65	3.65
	4.1*	4.1	4.1
		4.5	4.5
	4.8*	4.8*	
		5.2 Cortical	



Fresa recta

- 16 mm
- 13 mm
- 11.5 mm
- 10 mm
- 8 mm
- 6 mm
- 0 mm

* 3mm menos que la longitud del implante. Tenga en cuenta que esta fresa puede ser reemplazada por su correspondiente fresa por pasos, a lo largo de la longitud del implante Ver el protocolo de fresado por pasos. Cortical - Perfore a través de la placa cortical.